

Expert premium multifocal - Anpassleitfaden

Die Anpassung in wenigen und leichten Schritten

Unser neuer Anpassprozess basiert auf praktischen Erfahrungen von Kontaktlinsenspezialisten.

- Die Anpassung geringer Additionen ist durch die Verwendung der D-Version auf beiden Augen einfacher.
- Die Anpassung hoher Additionen bleibt flexibel und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten für eine herausragende Sehleistung.



Neuanpassung:

Schritt 1 Aktuelle Refraktion und (fern-)dominantes Auge (Akzeptanzmethode bestimmen).

Schritt 2 Wählen Sie den sphärischen Wert entsprechend der Fernrefraktion (HSA berücksichtigen). Wählen Sie D- oder N-Version entsprechend der erforderlichen Addition:

Addition	(Fern-)dominantes Auge	Nicht (fern-)dominantes Auge
+1,00	D	D
+1,50	D	D
+2,00	D	N
+2,50	D	N

Schritt 3 Toleranzzeit: 15 Minuten – bevor Sie den Seherfolg kontrollieren.

Optimieren Ferne: Addieren Sie -0,25D auf dem (fern-)dominanten Auge (D-Version).

Optimieren Nähe: Addieren Sie +0,25D auf dem nicht (fern-)dominanten Auge (N-Version)

Tipps aus der Praxis Ferne: Soviel Plus wie möglich, so wenig Minus wie nötig.

Überprüfen Seherfolg Nähe: mit Sehaufgaben des Alltags z. B. Lesen Tastatur Handy.

Addition : Wählen Sie die geringere Addition sofern möglich; eine zu hoch gewählte Addition kann sich nachteilig auf den Seherfolg auswirken.

Überprüfen Visus bei eingeschalteter Raumbeleuchtung.

Expert premium multifocal - Anpassleitfaden

Eine einzigartige multifokale Kontaktlinse für einzigartige Augen

Balanced Progressive Technology™

- Entwickelt für außergewöhnliches Sehen in allen Entfernungen: Nähe, Zwischenbereich und Ferne.
- Erlaubt eine auf den Träger abestimmte Anpassung.
- Der einfache Leitfaden der Expert premium multifocal Kontaktlinsen unterstützt den Anpasserfolg.

Nachkontrolle – eine Woche später

Sofern ein Optimierungsbedarf in der Ferne oder in der Nähe besteht:

Schritt 1 Überprüfen binokularer Visus.

Schritt 1 Durchführen der Überrefraktion mit Messgläsern/Flipper (Nicht verwenden: Phoropter/Messbrille).

Zur Verbesserung des Sehens in der Ferne bzw. in der Nähe addieren Sie +/- 0,25D auf den Fernwert des Auges, welches die Optimierung erfordert.

Der Kontaktlinsenspezialist entscheidet, wie und welche Kontaktlinsen angepasst werden.

Produktinformation: Expert premium multifocal

Sphäre: -10,00 bis +6,00D
Addition: +1,00 / +1,50 / +2,00 / +2,50
Linsentypen: D-Linse
N-Linse
Basiskurve: 8,60 mm
Durchmesser: 14,00 mm

